

製品安全性情報

【デンタルライト用ハロゲンランプのご注意】

- ハロゲンランプは必ず、当社が供給する専用のハロゲンランプをご使用ください。

当社が供給する専用のハロゲンランプ以外をご使用されますと破損や早期のランプ切れのおそれがあるためです。

- ハロゲンランプを交換する際はガラス部分を素手で触らないようにしてください。

素手で触ったり、汚れが付いたまま使用すると、その部分だけ周囲と温度差が発生し膨張率が変わりガラスが割れる原因となることがあります。

※ガラス部分を素手で触ってしまったり、汚れが付着した場合は必ずアルコールで良く拭き取るようにお願いします。